

ANNEXE 3

GUIDE DU NETTOYAGE DES DISPOSITIFS CIDELEC

Selon le type de dispositif médical CIDELEC utilisé, le protocole de nettoyage est différent. Le produit recommandé pour ces protocoles est de l'Aniosyme X3 des laboratoires Anios.

Protocole 1

- 1 - A l'aide d'une compresse imbibée de la solution diluée à 0,5% d'Aniosyme X3, nettoyer le dispositif jusqu'à disparition complète des souillures/salissures, en insistant particulièrement sur les parties en contact avec le patient.
- 2 - Passer successivement 3 lingettes imbibées d'eau du robinet, sur le dispositif, pour enlever les résidus de détergent.
- 3 - Laisser à l'air libre jusqu'à séchage complet (15 min minimum).

Protocole 2

- 1 - Immerger le dispositif [mais pas le(s) connecteur(s)] dans un bac contenant de l'eau chaude du robinet, pendant 10-15 min, pour dissoudre les résidus de pâtes / colles.
- 2 - Nettoyer les souillures/salissures avec une brosse.
- 3 - Retirer les souillures/salissures avec une compresse imbibée de la solution diluée à 0,5% d'Aniosyme X3.
- 4 - Rincer à l'eau pendant 1 min.
- 5 - Laisser à l'air libre jusqu'à séchage complet.

Protocole 3

- 1 - Immerger totalement le dispositif dans un bac contenant une solution diluée à 0,5% d'Aniosyme X3 et laisser tremper 5 min.
- 2 - Nettoyer les souillures/salissures avec une brosse.
- 3 - Rincer à l'eau pendant 1 min.
- 4 - Laisser à l'air libre jusqu'à séchage complet.

Protocole 4

- 1 - Lavage en machine ou à la main à moins de 30°C
- 2 - Laisser sécher à l'air libre

Protocole 5

1 - Passer un chiffon humecté de détergent doux, d'alcool isopropylique ou d'une solution composée de 10% d'eau de Javel et de 90% d'eau (eau de Javel domestique [contenant moins de 10% d'hypochlorite de sodium]) sur toutes les surfaces de contact avec le patient.

2 - Laisser sécher complètement avant de réutiliser. N'utiliser aucun agent de nettoyage caustique ou abrasif pour nettoyer le capteur. Ne pas utiliser de nettoyeurs qui contiennent du chlorure d'ammonium. L'utilisation de ces produits chimiques risque de raccourcir la durée de vie du produit.

Protocole 6

1 - Passer un chiffon doux humecté de détergent doux ou d'une solution composée de 10% d'eau de Javel et de 90% d'eau (eau de Javel domestique [contenant moins de 10% d'hypochlorite de sodium]) sur toutes les surfaces de contact avec le patient.

2 - Laisser sécher complètement avant de réutiliser. N'utiliser aucun agent de nettoyage caustique ou abrasif pour nettoyer le capteur. Ne pas utiliser de nettoyeurs qui contiennent du chlorure d'ammonium ou de l'alcool isopropylique. L'utilisation de ces produits chimiques risque de raccourcir la durée de vie du produit.

Le tableau ci-dessous précise quel protocole suivre pour une référence CIDELEC donnée.

Références CIDELEC	Désignation	Protocole à suivre
CID102L	Polygraphe ventilatoire portable	Protocole 1
CID-LX / CID-LX-206d / CID-LXa / CID-LXa-206d		
CID102L8		
CID-LXe / CID-LXe-206d		
CID102L8D		
CHL102 / CH102-485 / AX01	Alimentations et chargeurs	
102ACPA / 102PCPA L102A / L102P L102ACP / L102PCP L8102ACP / L8102PCP L8102ACPA / L8102PCPA SL01 / SL02 / SL03 / SL04 SX01	Capteurs son, Capteurs position, Capteurs son-position, Capteurs son-position-actimètre	Protocole 1
OX02 / OX03 / OX04 / LNONSS / L8NONSS / LNONSM / L8NONSM / LNONSL / L8NONSL	Capteurs oxymètres type moufle	Protocole 5
LNONJ / L8NONJ / LNONJP / L8NONJP	Capteurs oxymètres type languette	Protocole 5
OX01 / LNONAA / L8NONAA / LNONJP / L8NONJP	Capteurs oxymètres type pince	Protocole 6
ADAPTUSB / AX02 / BX01 CID09 / CID10 / CID49 CID50L / CID50LP / CID50S / CID56 CID81 / CID81/2 / CID82 EX01	Cordons et rallonges	Protocole 1
FEyy-xxx	Faisceaux d'électrodes	Protocole 1
5ECFL108 / 5ECFM108 EX04 / EX05 / EX06 / EX08 / EX09 / EX10 EX12	Electrophysiologie avec cupules ou cupules et pressions	Protocole 2
5CPFL108 / 5CPFS108 CID85 / CID86 JCPRVN / LJD102LFP EX03 / EX07 / EX11	Electrophysiologie avec pressions	Protocole 1 ou 2 selon le degré de salissure
3H39227 / 6RL206D 20MTLL013 / 20MTLL025 / 20MTLL035 FLE1206D	Accessoires de pression	Protocole 3
CC203 / L8203	Boucles, boîtier câble et connecteur (sauf élastiques et velcros démontables : voir ELA / ELE)	Protocole 1
ELA / ELE PTM2 RV5 / AX03	Elastiques et velcros démontables Passe-tubes Passant velcro	Protocole 4
SI203-xx	Sangles inductives	Protocole 4