

Démarrage

Branchez le connecteur noir du capteur sur le connecteur noir de l'appareil, celui désigné par l'inscription "JAWAC".



Alignez bien l'encoche du connecteur capteur avec la crête sur le connecteur de l'appareil avant d'enfoncer. Ne pas forcer.

L'appareil se met en marche dès que l'on y branche le capteur de distance.
Le témoin lumineux vert clignote lorsque l'enregistrement est en cours.

Le matin, au réveil

- Débranchez le capteur de distance.
- Ne pas tirer sur les câbles, tirez uniquement sur les connecteurs.
- Enlevez l'adhésif délicatement en plaçant un doigt sur le câble.



- Rapportez l'équipement à votre médecin.

MUP Brizzy REV11_FR - Février 2017

Nomics
Rue des Chasseurs Ardennais 4
4031 Angleur (Belgium)
sales@nomics.be

CE0086




Brizzy

Notice patient


BRIZZY est un enregistreur portable du sommeil simple d'utilisation. Vous pouvez aisément mettre l'appareil en place vous-même en respectant les consignes suivantes.

Mise en place du capteur de distance


- 1** Enlevez le « liner » blanc d'un adhésif.

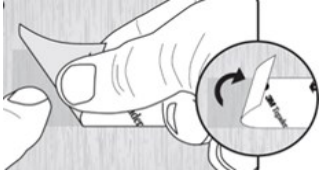


- 2** Placez une sonde sur la partie collante.

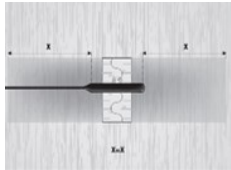


- 3** Collez la sonde horizontalement sur le front. Répétez les étapes 1 et 2 pour la seconde sonde et placez-la sur le menton.

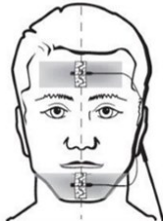


Les 2 sondes doivent être dans le même axe vertical, les câbles étant dirigés du même côté.

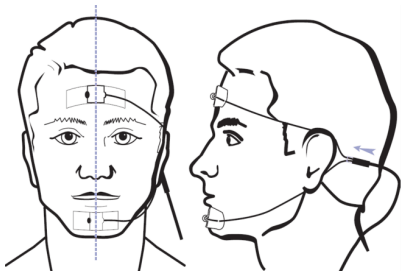

- 4** Enlevez le second « liner » de l'adhésif en utilisant la séparation au milieu.

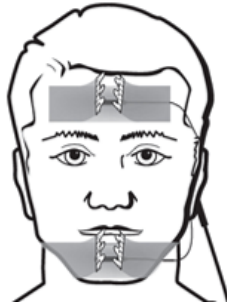


- 5** Modelez et lissez le film minutieusement. Le capteur ne doit plus bouger.

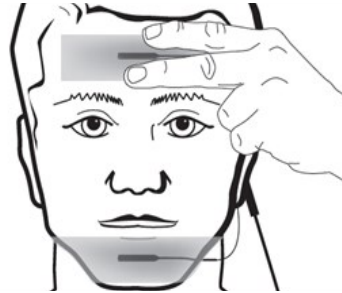

Répétez les opérations pour la seconde sonde. Finissez en veillant à bien positionner les fils de manière à ce qu'ils repassent derrière l'oreille.

Vérifiez que les sondes sont bien collées sur le visage et qu'elles ne peuvent ni bouger ni pivoter.

Mise en place de l'enregistreur

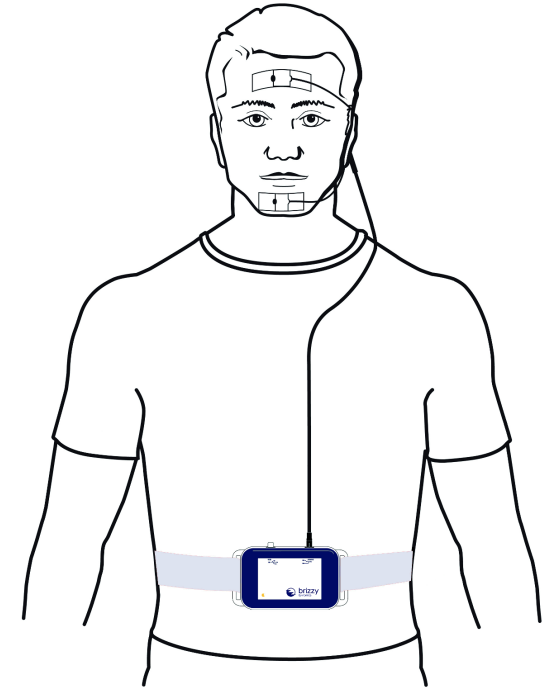

Faites passer la ceinture abdominale dans les fentes de l'appareil. Installez l'appareil sur le ventre (par-dessus un T-shirt ou une chemise de pyjama) en ajustant la ceinture confortablement.