Spirodoc[™]

Guide de fonctionnement simplifié Spiro



Touche marche/arrêt



()	Saisir les informations du patient	(<u>18</u>	Rechercher un test effectué après la date sélectionnée
	Effectuer un nouveau test en utilisant le patient sélectionné		≡)	Examiner tous les tests de la base de données
₽₽C	Modifier les informations du patient		A _{Bc}	Rechercher un test en utilisant le nom de famille du patient
Þ	Accéder à la base de données des patients/tests		I	Imprimer via la connexion Bluetooth
) E	Rechercher un test en utilisant la date de naissance		ALT)	Insérer un caractère spécial
	Modifier les paramètres (menu de service)		>>)	Test rapide sans saisir les données du patient





Saisir un nouveau patient :

Dans le menu principal, appuyer sur :



Test de spirométrie :

Après la création d'un nouveau patient, le menu principal s'affichera à nouveau :

1ère étape : Appuyer sur pour effectuer un test de spirométrie, puis sélectionner le

type de test :



Appuyer sur pour effectuer le test POST bronchodilatateur.

(disponible après qu'un test PRE ait déjà été effectué)

- **2ème étape :** Le type de turbine utilisée et les instructions de manœuvre s'afficheront. Il faut expliquer au patient comment suivre les instructions.
- 3ème étape : Après avoir terminé la manœuvre, appuyer sur la touche marche/arrêt.

Les résultats s'afficheront.

Appuyer sur 🔊 et sur les flèches "HAUT" ou "BAS" pour faire défiler les

résultats.

4ème étape : Appuyer sur **K** pour revenir au menu principal.

5ème étape : Appuyer sur pour afficher les 3 meilleurs tests (*le cas échéant*) pour la session du patient



* Les tests VC et MVV ne sont pas disponibles en cas de Test rapide ou quand la norme NHANES III a été sélectionnée par défaut.

Test d'oxymétrie (fonction facultative) :

Appuyer sur pour effectuer un test d'oxymétrie, puis sélectionner le type de test

Test ponctuel Sp02

1ère étape	Appuyer sur 🚺 pour démarrer le test
2ème étape	Appuyer sur la touche ON/OFF pour terminer le test

6MWT (test de marche)

1ère étape	Appuyer sur The pour démarrer la phase de REPOS INITIAL
2ème étape	Appuyer sur 🕅 pour passer à la phase de MARCHE
3ème étape	Appuyer sur 🧖 pour passer à la phase de RÉTABLISSEMENT
4ème étape	Appuyer sur RE pour insérer la distance parcourue
	Appuyer sur la touche ON/OFF pour terminer le test
5ème étape	Appuyer sur OUI pour saisir les données supplémentaires suivantes : Administration d'oxygène, DYSPNÉE, FATIGUE, POULS
6ème étape	Appuyer sur NON pour afficher le résultat du test

Test du sommeil (ODI)

1ère étape	Appuyer sur pour démarrer le test d'oxymétrie du sommeil (ODI)
2ème étape	Mode économie d'énergie automatique au bout de 5 min
3ème étape	Appuyer sur la touche ON/OFF pour terminer
4ème étape	Appuyer sur 24h pour rechercher les tests >12 heures



lcônes d'oxymétrie communes à tous les tests :



Spirodoc_QG_2014_02_FRA

4