

Chères et chers Docteurs,
Chères utilisatrices et chers utilisateurs des appareils Brizzy, Brizzy+ et Somnolter,

Dans le cadre du processus continu d'amélioration de la qualité de ses produits et services, Nomics a le plaisir de vous proposer une toute nouvelle gamme d'adhésifs destinés au support et à la fixation de ses capteurs de mouvements mandibulaires Jawac.

Ce dispositif nommé **JAWAGRIPS**, agréé selon les normes internationales, permet une fixation optimale des capteurs faciaux à la fois au niveau du menton et du front, les deux points strictement nécessaires à une mesure optimale des mouvements mandibulaires.

Comme vous le verrez sur les schémas ci-après, les adhésifs Jawagrips intégrant une fermeture de type « Velcro » permettent un positionnement idéal des deux pôles du capteur Jawac. De plus, ils assurent une optimisation de la précision du signal et du confort du patient, ainsi qu'une utilisation plus respectueuse de matériel, tant au moment de la pose que de l'enlèvement de celui-ci. En suivant les consignes transmises dans ce document, vous obtiendrez une qualité de signal adéquate ainsi qu'une durée d'utilisation accrue de nos capteurs.


Instructions de placement :

1. Fixez la sonde en refermant les velcros






2. Utilisez une des parties latérales des velcros pour immobiliser le câble

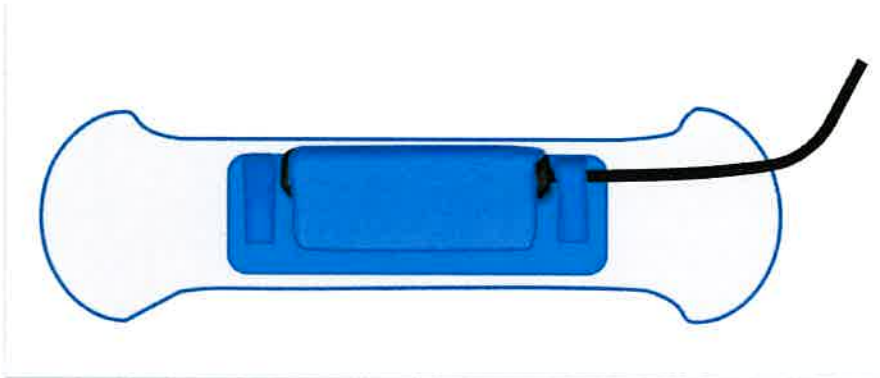

3. Collez les adhésifs horizontalement sur le front et le menton

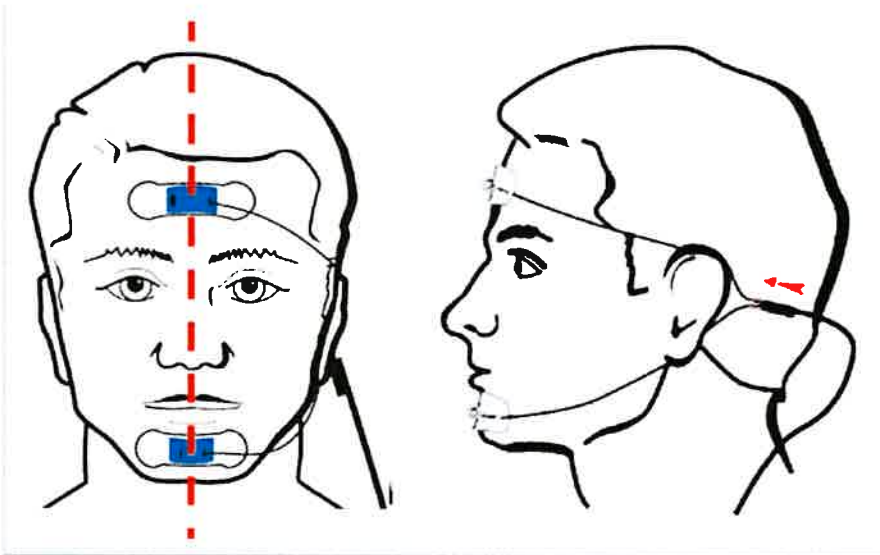

Nomics

Liège Science Park

Rue des Chasseurs Ardennais, 4 - 4031 Angleur (Belgium)

+32 (0) 4 372 93 48 · info@nomicscare.com